



NÁVOD K POUŽITÍ UŠNÍ SADY

PRO SLUCHADLA WIDEX




WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA BTE

(Vyplní odborník na sluchadla.)

Váš typ ušní sady:


INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE

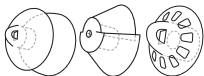

UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE




INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4

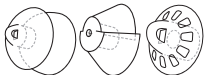

UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4



☐ INSTANTNÍ A UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S KLASICKOU TENKOU HADIČKOU

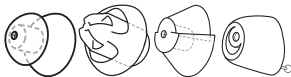

☐ UŠNÍ TVAROVKY PRO SLUCHADLA S KLASICKOU HADIČKOU




OBSAH

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO MODELY RIC/RITE..... | 6 |
| Čistící nástroje..... | 6 |
| Čištění..... | 7 |
| Ochrana před ušním mazem..... | 8 |
| Výměna ušní špičky..... | 10 |
| Kotvička..... | 11 |
| UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO MODELY RIC/RITE..... | 13 |
| Čistící nástroje..... | 13 |
| Čištění..... | 14 |
| Ochrana před ušním mazem..... | 15 |
| INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4 | 18 |
| | 18 |
| Čistící nástroje..... | 18 |
| Čištění..... | 19 |
| Ochrana před ušním mazem..... | 20 |
| Výměna ušní špičky..... | 22 |
| Výměna tenké hadičky..... | 22 |
| Kotvička..... | 24 |
| UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO TENKOU HADIČKU 0.9 A 1.4..... | 25 |
| Čistící nástroje..... | 25 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Čištění..... | 26 |
| Ochrana před ušním mazem..... | 27 |
| INSTANTNÍ A UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO KLASICKOU TENKOU | |
| HADIČKU..... | 30 |
| Čistící nástroje..... | 30 |
| Čištění..... | 32 |
| Výměna ušní špičky..... | 34 |
| Výměna tenké hadičky..... | 36 |
| Kotvička..... | 36 |
| KLASICKÉ UŠNÍ TVAROVKY..... | 39 |
| Čistící nástroje..... | 39 |
| Čištění..... | 39 |
| Výměna hadičky..... | 41 |
| SYMBOLY..... | 42 |

INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO MODELY RIC/RITE

Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s různými továrními ušními koncovkami pro modely RIC/RITE. Obrázek znázorňuje sluchadlo s otevřenou ušní koncovkou, ale postup je shodný i u ostatních továrních ušních koncovek.

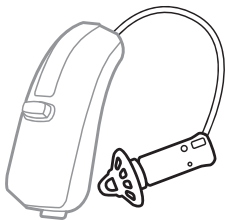


POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako na obrázku. Vyhradujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:

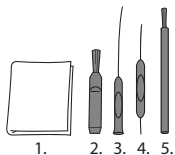

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie


Čištění

Čištění ušní sady



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká atd . Po použití očistěte hadříkem také hadičku..

Aby se na ušní koncovce nehromadil ušní maz, čistěte ji každý den malým kartáčkem. Je dobré tak činit každé ráno, poté co sluchadlo mohlo přes noc vyschnout.

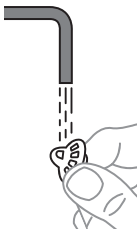

Tovární koncovku také můžete omýt ve vlažné vodě poté, **co ji odpojíte od zbytku ušní sady**. Nechejte ji přes noc vyschnout.



K čištění své ušní sady nepoužívejte žádnou tekutinu ani čisticí prostředek.



Reproduktor nesmí **nikdy** přijít do kontaktu s vodou, protože by jej mohla poškodit.


Pokyny k výměně ochrany před ušním mazem - filtru naleznete v části o ochraně před ušním mazem.

Ochrana před ušním mazem


Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.

Pravidelně kontrolujte, že filtr není zanešen ušním mazem, a to následujícím způsobem:

Nejprve odstraňte ušní koncovku z hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil maz, vyměňte jej.

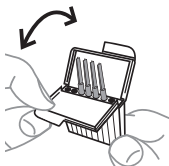


Otevřete krabičku filtrů jak je uvedeno na obrázku.

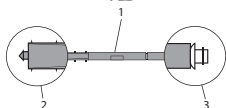


Filtr tvoří následující součásti:


1. Držák
2. Vydávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

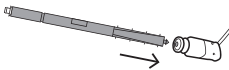


Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.

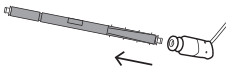

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

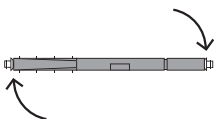

Otočte držák čistým filtrem ke sluchadlu.

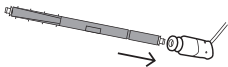

Vložte nový filtr do zvukového výstupu. Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen. Nasadte ušní koncovku zpět na hadičku.



Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.




Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

Výměna ušní špičky

Ušní koncovku byste dle potřeby měli měnit. Potřebujete-li další doplňky ušních koncovek nebo pokud Vám již ušní koncovka do ucha nepadne, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

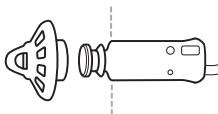

Nasadte novou ušní koncovku na reproduktor, dokud nedosáhne bodu vyznačeného tečkovanou linií. Při nasazování reproduktoreu do ušní koncovky byste měli ucítit, jak do sebe tyto dvě části zapadnou.

POZNÁMKA


Je velice důležité se ujistit, že je ušní koncovka pevně nasazena.



Nepokoušejte se odpojit hadičku od sluchadla.

Kotvička


Pokud máte otevřenou ušní koncovku nebo ušní koncovku ve tvaru tulipánu, k pohodlnému uchycení ušní koncovky v uchu můžete používat kotvičku. Postupujte následovně:

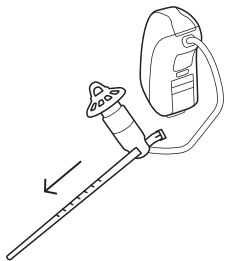

Protáhněte špičatý konec kotvičky otvorem na straně hadičky.
Kotvičku protahujte, dokud se nezastaví o svou úchopovou část na konci.
Vaše ušní sada je nyní připravena k použití.
Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve Vašem uchu.

UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY A UŠNÍ TVAROVKY PRO MODELY RIC/RITE

Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s individuálními ušními koncovkami a tvarovkami pro modely RIC/RITE. Není-li uvedeno jinak, obrázek znázorňuje sluchadlo s koncovkou..

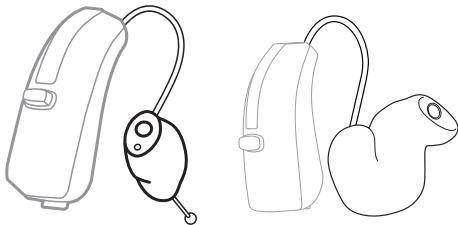

POZNÁMKA


K vytahování individuálních ušních koncovek z ucha vždy používejte vytahovací strunku.

POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako v této příručce.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

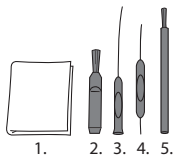

1. 2. 3. 4. 5.


Čištění



1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po použití očistěte hadříkem také hadičku.

Pomocí malého kartáčku nebo hadříku odstraňte veškerý viditelný ušní maz z okolí zvukového výstupu. Pokud je zvukový výstup zanešený, vyměňte ochranu před ušním mazem - filtr.
NEPOKOUŠEJTE se ochranu před ušním mazem čistit.

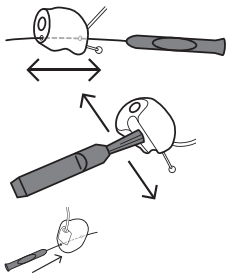

Vaše ušní koncovka / tvarovka může být vybavena ventilačním otvorem. Obrázky nalevo ukazují, jak čistit různé typy ventilačních otvorů.



Ušní sada nesmí nikdy přijít do kontaktu s tekutinami, jako je voda nebo čisticí roztoky.



Nikdy se nepokoušejte odpojit hadičku od individuální ušní koncovky / tvarovky ani od sluchadla, protože by mohlo dojít k poškození hadičky.



Sluchadlo z ucha nevytahujte taháním za hadičku, ale za vytažovací strunku koncovky..


Ochrana před ušním mazem

Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.


Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem.



Ušní koncovku / tvarovku z hadičky NESUNDÁVEJTE.

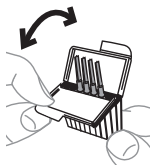


Otevřete krabičku filtrů, jak je uvedeno na obrázku.

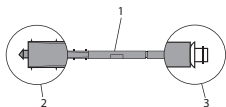


Filtr tvoří následující součásti:


1. Držák
2. Odstraňovací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

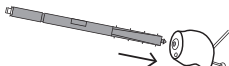


Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.

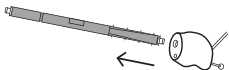

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

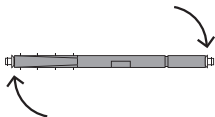

Otočte držák novým filtrem směrem ke zvukovému výstupu.

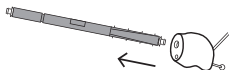

Vložte nový filtr do zvukového výstupu. Vytáhněte držák rovně ven. nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je nasazen správně.



Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.



Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem ve Vašem uchu uvolní, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA S TENKOU HADIČKOU 0.9 A 1.4

Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s továrními ušními koncovkami u sluchadel s tenkou hadičkou 0.9 a 1.4.




POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako na obrázku. Vyhrazujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

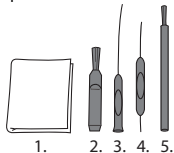


1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po použití hadičku očistěte hadříkem.

Aby nedocházelo k usazování ušního mazu na ušní koncovce, čistěte ji každý den malým kartáčkem. Je dobré tak činit každé ráno, poté co sluchadlo mohlo přes noc vyschnout.

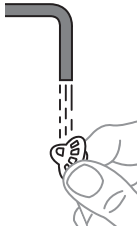

Tovární koncovku také můžete omýt ve vlažné vodě poté, **co ji odpojte od zbytku ušní sady**. Nechejte ji přes noc vyschnout.



K čištění své ušní sady nepoužívejte žádnou tekutinu ani čisticí prostředek.


Pokyny k výměně ochrany před ušním mazem - filtru, naleznete v části o ochraně před ušním mazem.

Ochrana před ušním mazem

Ochrana před ušním mazem- filtr pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex.

Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem, a to následujícím způsobem:

Nejprve odstraňte ušní koncovku od hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil maz, vyměňte jej. **NEPOKOUŠEJTE** se ochranu před ušním mazem čistit.

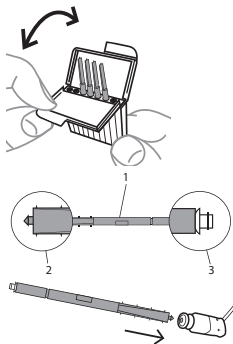


Otevřete balení filtrů, jak je uvedeno na obrázku.

Filtr tvoří následující součásti:

1. Držák
2. Odstraňovací háček
3. Ochrana před ušním mazem-filtr

Zasuňte odstraňovací háček do použitého filtru.

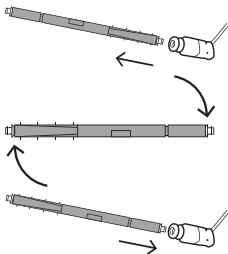

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

Otočte držák novým filtrem směrem ke zvukovému výstupu.

Vložte nový filtr do zvukového výstupu.

Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatláchte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen. Nasadte ušní koncovku zpět na hadičku.





Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.




Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

Výměna ušní špičky

Ušní koncovku byste dle potřeby měli měnit. Potřebujete-li další doplňky ušních koncovek nebo pokud Vám již ušní koncovkav uchu nesedí, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

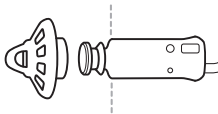

Nasadte novou ušní koncovku na tenkou hadičku, dokud nedosáhne bodu vyznačeného tečkovanou linií.

Při vkládání konce hadičky do ušní koncovky byste měli ucítit, jak do sebe tyto dvě části zapadnou.

POZNÁMKA


Je velice důležité se ujistit, že je ušní koncovka pevně nasazena.

Výměna tenké hadičky


Hadíčku v případě potřeby vyměňte. Potřebujete-li další pomůcky, kontaktujte svého sluchadlového odborníka.

Chcete-li hadičku ze sluchadla sundat, použijte k tomu speciální nástroj, který jste obdrželi spolu s hadičkou. **Postupujte následovně:**


1. Vložte hadičku do nástroje, jak ukazuje obrázek.

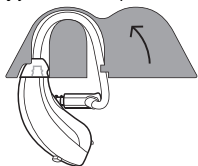

2. Odpojte ušní sadu ze sluchadla pod zobrazeným úhlem.

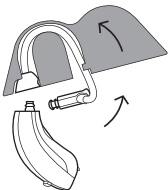


3. Poté do nástroje vložte novou hadičku a nasadte ji na sluchadlo.

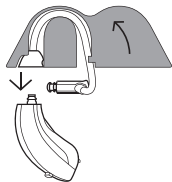

Kotvička


Pokud máte otevřenou ušní koncovku nebo ušní koncovkuve tvaru tulipánu, k pohodlnému uchycení ušní koncovky v uchu můžete používat kotvičku. Postupujte následovně:

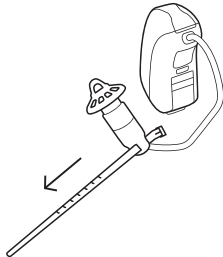

Protáhněte špičatý konec kotvičky otvorem na straně hadičky.
Kotvičku protahujte, dokud se nezastaví o svou úchopovou část na konci.
Vaše ušní sada je nyní připravena k použití.
Umístěte ji tak, aby pohodlně spočívala ve Vašem uchu.

UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO TENKOU HADIČKU 0.9 A 1.4

Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s individuálními ušními koncovkami sluchadel s tenkou hadičkou 0.9 a 1.4.

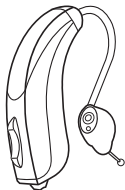

POZNÁMKA


Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako na obrázku. Vyhrazužeme si také právo provádět změny považované za nezbytné.

POZNÁMKA

Chcete-li **individuální ušní koncovku** z ucha vyjmout, vždy použijte vytahovací strunku.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:

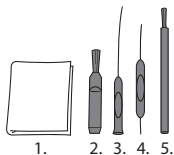

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění


Čištění individuální ušní koncovky



Ujistěte se, že je ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu, není vlhká atd. Po použití hadičku očistěte hadříkem.



Pomocí malého kartáčku nebo hadříku odstraňte veškerý viditelný ušní maz z okolí zvukového výstupu. Pokud je zvukový výstup zanešený, vyměňte ochranu před ušním mazem - filtr.
NEPOKOUŠEJTE se ochranu před ušním mazem čistit.

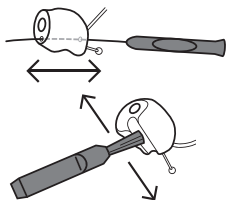

Vaše ušní koncovka může být vybavena ventilačním otvorem. Obrázky níže ukazují, jak čistit různé typy ventilačních otvorů.



Ušní sada nesmí nikdy přijít do kontaktu s tekutinami, jako je voda nebo čisticí roztoky.




Sluchadlo z ucha nevytahujte taháním za hadičku, ale za vytahovací strunku na koncovce.

Ochrana před ušním mazem


Ochrana před ušním mazem - filtr pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. U svého sluchadla používejte vždy filtry Widex. Pravidelně kontrolujte, že Váš filtr není zanesen ušním mazem.



Upravenou ušní koncovku z hadičky NESUNDÁVEJTE.

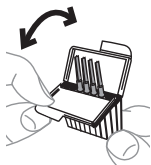


Otevřete balení filtrů, jak je uvedeno na obrázku.

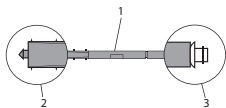


Filtry tvoří následující části:


1. Držák
2. Vydávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

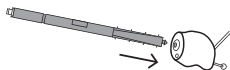


Zasuňte odstraňovací háček do použitého filtru.

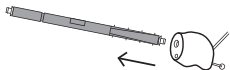

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

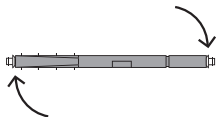

Otočte držák novým filtrem směrem ke zvukovému výstupu.

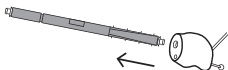

Vložte nový filtr do otvoru zvukového výstupu .
Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatláchte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen.



Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.




Pokud ochrana před ušním mazem není ve zvukovém výstupu pevně usazena, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud se ochrana před ušním mazem uvolní ve Vašem uchu, obraťte se na svého lékaře nebo sluchadlového odborníka, aby Vám ji vyjmul. **NE-SNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

INSTANTNÍ A UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY PRO KLASICKOU TENKOU HADIČKU

Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s různými ušními koncovkami u závěsných modelů BTE s tenkou hadičkou.

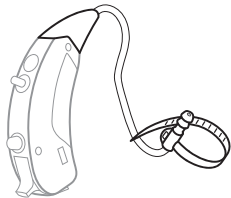


POZNÁMKA

Vaše ušní sada nemusí vypadat přesně jako v této příručce. Vyhradujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.


Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

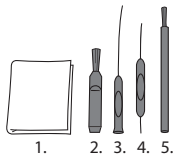

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění

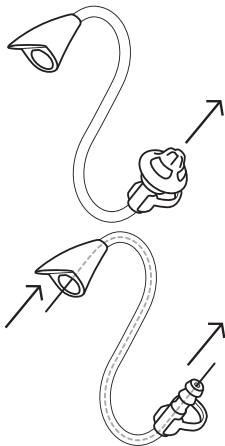


Opatrně odstraňte ušní sadu od sluchadla a stáhněte ušní koncovky z hadičky.

Pokud máte individuální ušní koncovku, nemusíte ji kvůli čištění hadičky sundávat.

K očištění hadičky použijte čisticí strunku. Protáhněte ji hadičkou. Vytáhněte ji opačným koncem.

Potřebujete-li získat čisticí strunku, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

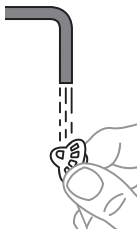


Tovární koncovku také můžete omýt ve vlažné vodě poté, **co ji odpojte od zbytku ušní sady**. Nechejte ji přes noc vyschnout.



Nikdy k čištění ušní koncovky nepoužívejte alkohol nebo jiné čisticí roztoky, protože by mohly způsobit změnu její barvy.


Výměna ušní špičky

Nasazení ovární ušní koncovky na hadičku

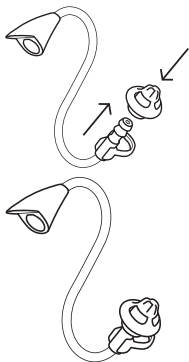


Opatrně zavádějte hadičku do ušní koncovky, dokud nedosáhne jejího konce. Je velice důležité se ujistit, že je pevně nasazena.

Nasazení individuální ušní koncovky na hadičku

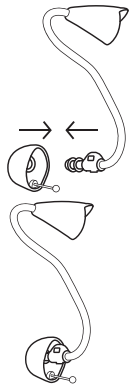

Přidržte individuální ušní koncovku a opatrně vsuňte hadičku na místo v ušní koncovce, jak je ukázáno na obrázku. Nehtem vtlačte hadičku co nejdále.

Výměna tenké hadičky

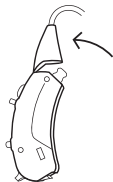

Odstraňte tenkou hadičku ze sluchadla odklopením tak, jak je znázorněno na obrázku.





Nasadte tenkou hadičku na horní stranu sluchadla, jak je zobrazeno.

Kotvička

Integrovaná kotvička se u tovární dvojité koncovky nepoužívá a je potřeba ji celou odříznout.

Pokud používáte otevřenou ušní koncovku nebo koncovku tulipán, musíte kotvičku seříznout, aby utvořila smyčku vhodné velikosti a pohodlně ukotvila ušní koncovku v uchu. Kotvičku seříznete následovně:

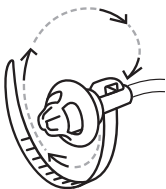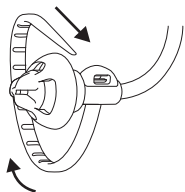


Příklad 1

Protáhněte špičku kotvičky malým otvorem na boku hadičky.

Když má smyčka správnou velikost, přebytek odstříhnete nebo odstraňte podobným nástrojem.

Příklad 2

Utvořte na kotvičce smyčku ve směru označeném tečkovanou linií a šipkami.

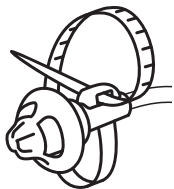

Vedte špičku kotvičky malým otvorem na boku hadičky podle obrázku a vytvoříte smyčku ve tvaru srdce.



Když má smyčka správnou velikost, obraťte ušní sadu a přebytek odstříhnete nebo odstraňte podobným nástrojem.

Kotvicí smyčka má správnou velikost, když zajišťuje správnou polohu sluchadla v uchu, a když je ušní sada pevně usazena v uchu a na něm.

POZNÁMKA

Ujistěte se, že je konec kotvicí smyčky provlečen malým otvorem, a že nemá žádné ostré hrany, protože ty by mohly ucho dráždit. Špičkou prstu zkontrolujte, zda jsou hrany hladké.

POZNÁMKA

Integrovaná kotvička se **NEPOUŽÍVÁ** u individuální ušní sady a je potřeba ji celou odříznout.

KLASICKÉ UŠNÍ TVAROVKY


Tato kapitola popisuje, jak čistit a zacházet s klasickými ušními tvarovkami u závěsných modelů BTE.

POZNÁMKA

Vaše ušní tvarovka nemusí vypadat přesně jako v této příručce.

Čistící nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čistící nástroje:

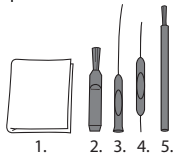


1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění



Ujistěte se, že je Vaše ušní sada vždy čistá a bez ušního mazu a není vlhká. Po použití ušní sadu otřete hadříkem.

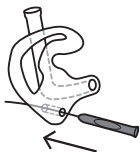


Pokud Vaše tvarovka má ventilační otvor, očistěte jej nástrojem pro odstraňování ušního mazu.



Hadičku s ušní tvarovkou odpojte od háku sluchadla.



Hadičku s ušní tvarovkou důkladně opláchněte vlažnou vodou. Přes noc je nechejte vyschnout.

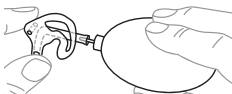

Pokud je ušní tvarovka nebo hadička vlhká, musíte ji před připojením k háku sluchadla důkladně vysušit (např. fénem)..



Nikdy k čištění ušní koncovky nepoužívejte alkohol nebo jiné čisticí roztoky, protože by mohly způsobit změnu její barvy.

Výměna hadičky

Pokud se hadička Vaší ušní sady zlomí, vyměňte ji.

Potřebujete-li další pomůcky k hadičce nebo pokud už Vám ušní tvarovka v uchu neseď, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

SYMBOLY

Symbole používané v materiálech k lékařským zařízením společnosti Widex A/S (štítky, návody k použití apod.)

Symbol Název/Popis



Výrobce

Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.



Katalogové číslo

Katalogové číslo (číslo položky) produktu.



Přečtěte si návod k použití

Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.



Varování

Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.



Označení WEEE

„Nepatří do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.



Označení CE

Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.

| Symbol | Název/Popis |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|



| | |
|--|---------------------|
| | Označení RCM |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| | |
|--|---------------|
| | Rušení |
|--|---------------|

| | |
|--|------------------------------------------------------------------|
| | V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení. |
|--|------------------------------------------------------------------|

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz**Widex OSTRAVA**

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngbe, Denmark

www.widex.com**Návod č.:**

9 514 0368 020 #01

Vydáno:

2017-01

