

# WIDEX®

HIGH DEFINITION HEARING

Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9

Tel. 283 882 217, info@widex.cz

---

## Zábleskový budík time flash



A-3140-0 – bílá verze

A-3141-0 – černá verze

A-4142-0 – stříbrná verze

Návod k použití



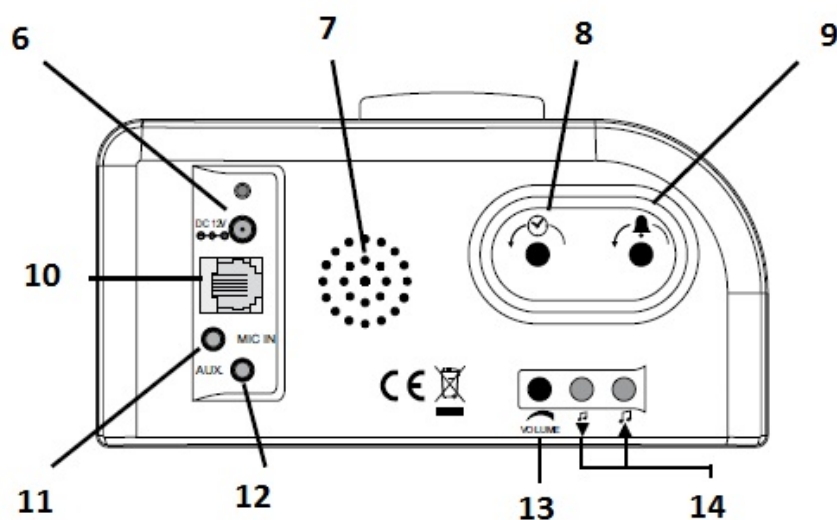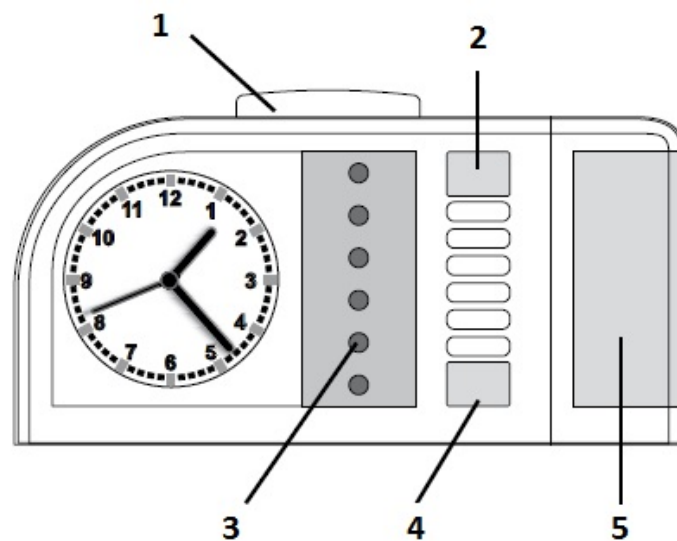

## Popis produktu:

1. Světlo, přijímací tlačítko
2. Tlačítko signalizace (zapnuto ON/vypnuto OFF)
3. Indikační diody
4. Tlačítko akustického alarmu (zapnuto ON/vypnuto OFF)
5. Záblesková lampa
6. Konektor pro připojení síťového adaptéru
7. Zvukový výstup akustického alarmu
8. Ovladač pro nastavení hodin
9. Ovladač pro nastavení času buzení
10. Konektor pro připojení telefonní linky
11. Konektor pro připojení mikrofону
12. Konektor pro připojení přídatných signalizačních modulů
13. Regulace hlasitosti akustického alarmu
14. Regulace tónu alarmu

Na spodní straně najdete i regulátor nastavení citlivosti mikrofону

Gratulujeme Vám k zakoupení zábleskového budíku time flash. Doufáme, že Vám bude tento přístroj sloužit bez problémů řadu let. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pomůže Vám správně nastavit přístroj a objasní Vám všechny jeho výhody.

## **Obsah balení**

Zábleskový budík

Síťový adaptér 230 V / 12 v, 1000 mAh

Návod k použití

Záruční list

## **Princip fungování**

Budík time flash je elektronický a má analogový číselník. Může Vás zbudit pomocí silných záblesků nebo i akustickým alarmem. K tomuto budíku můžete také připojit telefonní kabel (není součástí balení) a budík Vám bude signalizovat to, že Vám někdo volá na pevnou linku. K budíku také můžete připojit přídatné signalizační moduly a speciální příslušenství:

- Vibrační polštářek (objednací číslo A-3303-0)
- Zábleskový modul (objednací číslo A-3320-0)
- Přepínací modul (objednací číslo A-3330-0)
- Akustický modul (objednací číslo A-3340-0)
- Telefonní kabel (dodání v různých délkách)
- Mikrofon (3.5 mm jack)

## **Nastavení**

Pomocí přiloženého síťového adaptéru připojte zábleskový budík do sítě (230 V). Nejdříve připojte adaptér do budíku a až poté do elektrické sítě. Po správném propojení se budík ohlásí blesknutím u číselníku a pípnutím. Také se začne pohybovat vteřinová ručička.

## **Nastavení času**

Černým ovladačem na zadní straně budíku si nastavte přesný čas.

## **Nastavení alarmu buzení**

Černým ovladačem na zadní straně budíku si nastavte čas buzení.

## **Zapnutí / Vypnutí zábleskového alarmu**

Stisknutím tlačítka ON/OFF (pozice 2 na obrázku) si volíte funkci zábleskového buzení.

Vysunuté tlačítko (uvidíte zelenou barvu tlačítka) znamená zapnuto ON. Zamáčknuté tlačítko znamená vypnuto OFF.

## **Zapnutí / Vypnutí akustického alarmu**

Stisknutím tlačítka (pozice 4 na obrázku) si volíte funkci akustického buzení. Vysunuté tlačítko (uvidíte zelenou barvu tlačítka) znamená zapnuto ON. Zamáčknuté tlačítko znamená vypnuto OFF.

## **Volba typu akustického alarmu**

Pomocí šipek na zadní straně budíku (pozice 14 na obrázku) si můžete zvolit 10 různých typů tónové sekvence.

## **Odložení (posunutí) alarmu**

Pro odložení alarmu stiskněte při signalizaci horní tlačítko (pozice 1 na obrázku). Alarm se automaticky znovu zapne za 5 minut.

## **Signalizace vyzvánění telefonní pevné linky**

Tento budík dokáže také signalizovat vyzvánění vašeho telefonu - pevné linky. Nabízíme dvě možnosti propojení:

1. Propojení pomocí telefonního kabelu (není součástí balení) – viz pozice 10 na obrázku
2. Propojení přes externí mikrofon (není součástí balení) – viz pozice 11 na obrázku

Upozornění: Vyzvánění signál telefonu je továrně nastaven a nemůže být změněn pomocí tlačítek změny tónu.

## **Nastavení citlivosti**

Nastavte hlasitost vyzvánění telefonu na nejvyšší úroveň. Nastavte citlivost na nejnižší úroveň - otáčením regulátoru proti směru hodinových ručiček. Vyvolejte vyzvánění telefonu a postupně zvyšujte citlivost otáčením regulátoru po směru hodinových ručiček až do doby, kdy začne budík signalizovat.

Upozornění: Je možné, že bude telefonní signál jednou spuštěn, pokud změníte sluchátko, které bude nastaveno na velké zesílení.

## **Osvětlení číselníku**

Stisknutím tlačítka na horní straně budíku si můžete na dobu 6 sekund osvětlit číselník.

## **Speciální funkce**


- Alarm je automaticky opakován po cca 5 minutách až do doby, než zamáčknete (vypnete) tlačítko alarmu ON/OFF (pozice 2 na obrázku).
- Quartz mechanismus budíku má záložní napájení. Znamená to, že bude pracovat i při výpadku napětí a to po dobu cca 2 hodin. V této době nefunguje alarm ani osvětlení číselníku.
- Číselník je při spuštění signalizace automaticky osvětlen.
- Tlačítko ON/OFF je nejen označeno zeleně, ale spuštěný alarm je také signalizován rozsvícenou červenou LEC diodou, která je umístěna v horním tlačítku.
- Při signalizaci alarmu je využíváno i 6 bílých LED diod na čelní straně budíku, které střídavě blikají.

## Záblesky

Záblesky mohou být při signalizaci alarmu vypnuty. Pokud chcete záblesky opravdu vypnout, pak postupujte následovně:


### Vypnutí záblesků:

- Zamáčkněte obě tlačítka na čelní straně budíku – pozice 2 a 4 na obrázku.
- Stiskněte tlačítko na horní straně budíku (pozice 1 na obrázku) a držte ho zmáčknuté
- Stiskněte 6x tlačítko označené notou a šipkou dolů (levé tlačítko pozice 14 na obrázku)
- Uvolněte obě tlačítka, nyní jsou záblesky vypnuty.

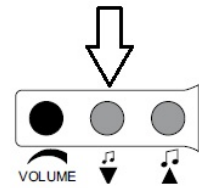

### Zapnutí záblesků:

- Zamáčkněte obě tlačítka na čelní straně budíku – pozice 2 a 4 na obrázku.
- Stiskněte tlačítko na horní straně budíku (pozice 1 na obrázku) a držte ho zmáčknuté
- Stiskněte 6x tlačítko označené notou a šipkou nahoru (pravé tlačítko pozice 14 na obrázku)
- Uvolněte obě tlačítka, nyní jsou záblesky zapnuty.

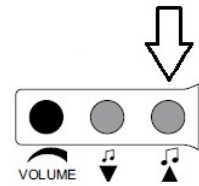

## Údržba přístroje

Tento budík je bezúdržbové zařízení. Jestliže se budík zašpiní, pak jednoduše použijte měkký vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Nevystavujte bezdrátový přijímač po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Kromě toho musí být také ochráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.

**Upozornění:** Všimněte si, že tento přístroj není ochráněn proti postříkání vodou. Neumísťujte proto vysílač do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny. Vysílač neumísťujte ani do blízkosti otevřeného ohně, např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů.

## Nakládání s odpady



Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic EU odevzdány do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na obalu produktu ukazuje, že nemá být vyhozen do normálního smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do příslušného sběrného dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní prostředí a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

## Technická data

<b>Napájení:</b>	230 V, 50 Hz / 12 V DC, 1000 mA
<b>Spotřeba:</b>	cca 2 W
<b>Rozměry:</b>	175 x 86 x 53 mm
<b>Hmotnost:</b>	cca 300 g
<b>Barva:</b>	Stříbrná



Toto zařízení splňuje následující směrnice EU:

- 2002/95/EG RoHS directive
- 2002/96/EG WEEE directive
- 1999/5/EG R&TTE directive
- 2004/108/EG EMC directive
- 2006/95/EG Low voltage directive

**Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje.** V případě poruchy zařízení kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven nebo vyměněn a zaslán zpět. Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci s přístrojem, opravu neautorizovaným servisem Humantechnik (neodtrhávejte proto garanční samolepku z přístroje) a na mechanické poškození. Záruka bude uznána pouze po předložení originálu záručního listu, případně originálu prodejního dokladu.

**Datum prodeje:** .....

**Výrobní číslo:** .....



**Razítko a podpis prodejce**