
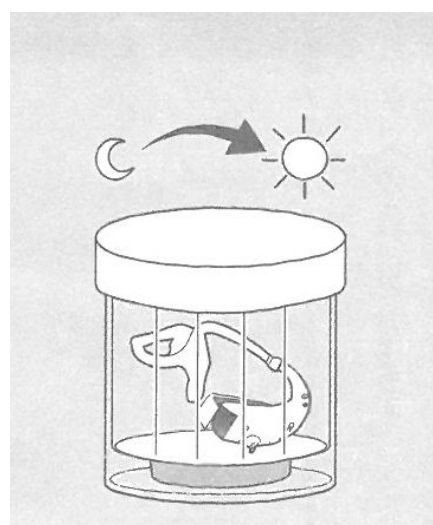


Sada vysušovacích tablet a plastové krabičky

Vysušovací tablety Widex Vám pomohou uchovať vaše sluchadlo v dobrém stavu, pretože vlhkosť je jednou z hlavních príčin problémů u sluchadel. Správným používaním týchto tablet se můžete vyhnout zbytočným opravám. Widex Vám doporučuje vložit Vaše sluchadlo do vzduchotěsné krabičky nebo sáčku každý den, když jdete spát. Pokud se mnoho nepotíte, pak Vám jedna tableta vystačí i na dvě sluchadla. Přečtěte si prosím také Váš návod k použití sluchadel.

Sada obsahuje 4 jantarově žluté odvlhčovací tablety. Tablety absorbují vlhkosť skrze kartónové víčko na tabletě. Pokud jsou již téměř bílé, jsou nasycené a tedy neúčinné. Jestliže neuchováte tablety v uzavřené plastové krabičce, pak automaticky absorbují vlhkosť ze vzduchu a rychle se vyčerpají. **POZOR!** Tabletu vyjměte z měkkého plastového obalu, následně je již připravena pro použití. Neotevírejte pevné tabletové kapsle! Nevkládejte tablety do úst! Uchovejte tablety z dosahu dětí!

Příprava: Otevřete krabičku, vyjměte sítko, vložte tabletu papírovou stranou nahoru, vložte sítko, sluchadlo a víčko zašroubujte.

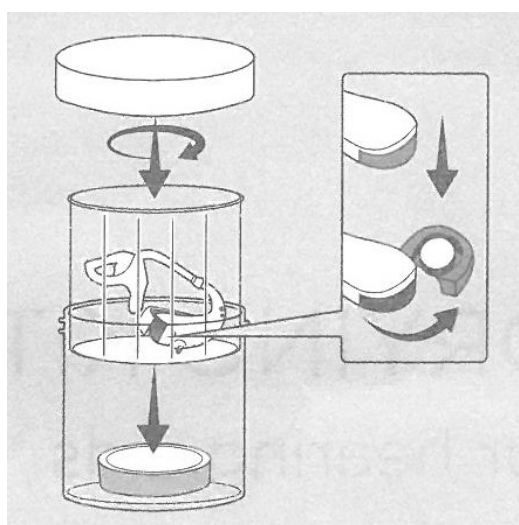

Denní použití se závěsným sluchadlem:

- sejměte tvarovku z Vašeho sluchadla, otevřete držák baterie a vyjměte baterii.
- vložte sluchadlo a tvarovku do plastové krabičky s tabletou.
- uzavřete plastovou krabičku víčkem.

Denní použití se zvukovodovým sluchadlem:

- otevřete bateriové víčko a vyjměte baterii,
- vložte sluchadlo do plastové krabičky s tabletou.
- uzavřete plastovou krabičku víčkem.

Péče o sluchadlo: Kontrolujte tabletu, zda-li není již téměř bílá. V tomto případě je nutné tabletu vyměnit. Není nutná speciální opatrnost při likvidaci tablet. Tablety neškodí okolnímu prostředí.

Životnost tablety je vyražena na měkkém plastovém obalu tablety, např. 02/2023. V tomto případě je minimální trvanlivost do února roku 2023.

První pomoc: Pokud se nadýcháte výparů, vyjděte na čerstvý vzduch, případně vyhledejte lékaře. Pokud se tableta dostane do styku s pokožkou, pak ji umyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a případně vyhledejte lékaře. Pokud se tableta dostane do styku s okem, pak ho vypláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud se tableta dostane omylem do úst, pak vypláchněte ústa, vypijte dostatečné množství vody a vyhledejte lékaře.

Složení: oxid křemičitý (silicon dioxide), Mohrova sůl (amonium iron III – sulfát-dodecahydrát).