

Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
Tel. 283 882 217, info.cz@widexsound.com

Indukční smyčka

CM-BT2

A-4548-0



Gratulujeme Vám k zakoupení indukční smyčky CM-BT2. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze pečlivě. Dozvíte se jak systém správně nastavit a také budete informováni o všech dostupných funkcích.

Základní informace

Technologie Bluetooth

Bluetooth je radiová technologie, která umožňuje bezdrátově propojit dva kompatibilní přístroje. K zajištění správné Bluetooth funkce je nutné, aby mezi přístroji nebyla žádná překážka.

Vzdálenost mezi přístroji (např. mobilním telefonem a jednotkou CM-BT2) nesmí být větší než 10 metrů. Překážky jako zdi nebo elektronické přístroje, mohou mít za příčinu rušení nebo sníženou kvalitu hovoru (přenosu).

Smyčka CM-BT2 s technologií Bluetooth 5.0 podporuje následující profily:

HSP – hovor, zvukový výstup

HFP – hands-free bezdrátová telefonie

A2DP – audio poslech (stereo sluchátka)

AVRCP – dálkové ovládání audio/video

Pro upřesnění typu technologie vašeho přístroje kontaktujte výrobce nebo prodejce.

Používání Bluetooth technologie může být v některých lokalitách zakázané. Pro více informací kontaktujte příslušné místní instituce nebo poskytovatele služeb.


Obsah balení:

Prosím, zkontrolujte si obsah balení, které má obsahovat následující komponenty:

- Jednotka CM-BT2
- Nabíjecí kabel (jack 3.5mm / USB)
- Redukce USB / auto nabíječka
- Redukce USB / síťová zásuvka
- Návod k použití, záruční list

Pokud bude něco scházet, ihned kontaktujte prodejce.

Popis přístroje

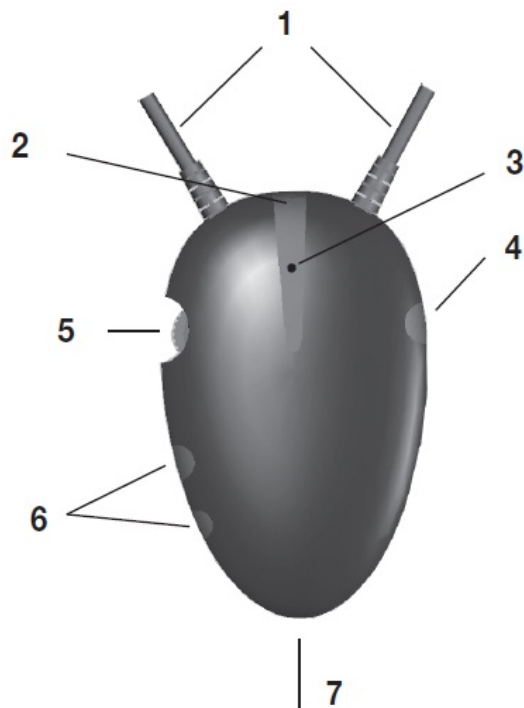

1 Smyčka

2 Indikátor

- Svítí červeně - přístroj vypnutý
- Bliká červeně – upozornění na nízkou baterii
- Modročervené blikání – mód párování
- Modré blikání každé 3 sekundy – pokus spojení
- Modré bliknutí (1 s) každých 5 sekund – spojení s přístrojem

3 Vestavěný mikrofon

4 Funkční klávesa

- Vypnutí/zapnutí přístroje
- Přijetí / ukončení hovoru
- Párování

5 Nastavení citlivosti

- Můžete si zvýšit / snížit účinek indukce

6 Nastavení hlasitosti

- Můžete si zvýšit / snížit hlasitost

7 Konektor pro sluchátka / nabíjecí konektor

- Do tohoto konektoru můžete připojit sluchátka (jack 3.5 mm) nebo nabíječku, která je součástí balení.

Nabíjení

Indukční smyčka CM-BT2 má vestavěnou, nabíjecí Li-Pol baterii. Před prvním použitím smyčku plně nabijte.



Upozornění:

V případě že není smyčka nabitá, pak nemůže být používána.

Nabíjení se síťovým adaptérem

Připojte nabíjecí kabel (konektor jack 3.5 mm) do nabíjecího konektoru (7). Druhou stranu kabelu zapojte do redukce USB/síťová zásuvka. Zkontrolujte připojení a následně vložte do zásuvky elektrické sítě (230 V). Při nabíjení svítí modrá LED dioda. Když dioda zhasne, smyčka je plně nabita.



Nabíjení přes USB počítače


Připojte nabíjecí kabel (konektor jack 3.5 mm) do nabíjecího konektoru (7). Druhou stranu kabelu zapojte do USB portu Vašeho počítače. Při nabíjení svítí červená LED dioda. Když bude dioda svítit modře, smyčka je plně nabita.

Doba nabíjení

Smyčka vydrží při plné nabití asi 3 hodiny hovoru případně 120 hodin pohotovostního režimu. Když je napětí baterie nízké, začne blikat červená dioda. Následně se musí baterie co nejdříve dobít.

Upozornění: Všimněte si, že životnost baterie je závislá na zvolené hlasitosti. Čím je smyčka nastavena na větší hlasitost, tím je životnost baterie kratší. Pokud není smyčka delší dobu používána, tak se vybije a následné nabíjení může trvat delší čas.


Vypínání / zapínání přístroje

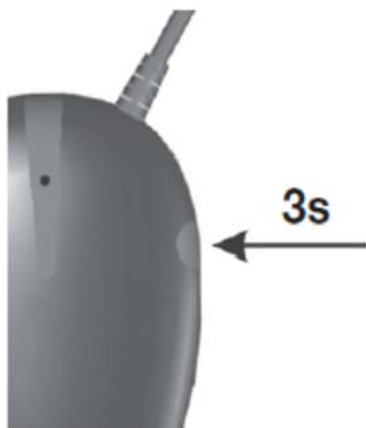

Stiskněte a držte funkční klávesu (4) po dobu asi 3 sekund – do té doby, než se rozsvítí modrá dioda. Pokud je zapojena smyčka nebo sluchátka, pak uslyšíte krátký akustický signál (pípnutí). Pokud je po zapnutí v dosahu nějaké napárované zařízení, pak se automaticky připojí.

Párování s kompatibilním mobilním telefonem

Před použitím smyčky s telefonem musí proběhnout párování těchto zařízení. Podrobnější informace o Bluetooth přenosu najdete v návodu k použití Vašeho telefonu. Následující postup se může lišit podle typu telefonu:

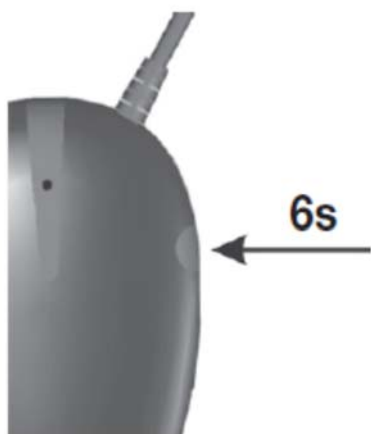

1. Zapněte telefon
2. Stiskněte funkční klávesu (4) po dobu asi 6 sekund – do té doby, než začne střídavě blikat červená a modrá dioda. Tato příprava na párování vydrží u smyčky 2 minuty.
3. Aktivujte Bluetooth na Vašem telefonu a v menu najděte funkci vyhledávání nového bluetooth

zařízení. Vyhledejte všechna dostupná zařízení.

4. V seznamu by se měla objevit i smyčka – CM-BT2. Zvolte ji a do následujícího přístupového kódu napište „0000“.

5. Pokud vše proběhne správně, tak začne dioda blikat modře. Ve sluchátkách nebo smyčce uslyšíte krátké pípnutí.

Párování stačí provést pouze jednou. Jestliže vypnete telefon nebo smyčku a následně opět zapnete, pak se přístroje opět napárují. Více informací o službách telefonu najdete v návodu k použití mobilního telefonu.

Pokud je mobilní telefon připojen ke smyčce, pak na smyčce blikne modrá dioda každých 5 sekund.

Na displeji telefonu se také zobrazí znak napárování (záleží na modelu telefonu).

Odpojení smyčky od telefonu

Pro odpojení komunikace udělejte jeden z následujících kroků:

- Vypněte smyčku
- Vypněte funkci Bluetooth
- Pokud bude vzdálenost mezi telefonem a smyčkou větší než 10 m, pak dojde k automatickému odpárování

Upozornění: Neodebírejte CM-BT2 ze seznamu napárovaných zařízení. Ztratili byste funkci automatického připojování.

Opětovné připojení k telefonu

Modrá dioda pravidelně bliká (každé 2 s) v případě, že není žádné zařízení aktuálně spárováno. Např. když je vzdálenost mezi přístroji příliš velká.

Když se přístroje dostanou do dosahu (do 10 m), tak se opětovně automaticky napárují. Pokud se tak nestane, pak krátce stiskněte funkční klávesu (4). Modrá dioda začne blikat každých 5 sekund a ozve se krátké pípnutí.

Základní funkce

Volání a přijímání hovorů

Před voláním je ujistěte, že je telefon připojen ke smyčce.


Když voláte vy, tak postupujte stejným způsobem jako obvykle. Spusťte volání a zvuk se automaticky přenese do smyčky. Nezapomeňte, že sluchadlo musí být přepnuto na indukční poslech – program T nebo MT.

Pro ukončení hovoru stiskněte funkční klávesu (4) nebo vypněte mobilní telefon.

Použití smyčky na poslech hudby


Pokud máte ve Vašem mobilním telefonu přehrávač hudby, pak ji můžete slyšet s pomocí smyčky CM-BT2 přímo do sluchadel. V případě příchozího hovoru bude poslech hudby přerušen a uslyšíte vyzvánění telefonu. Pro příjem hovoru stiskněte funkční klávesu (4). Po ukončení hovoru začne hudba opět hrát. Nezapomeňte, že sluchadlo musí být přepnuto na indukční poslech – program T nebo MT.

Nastavení hlasitosti poslechu

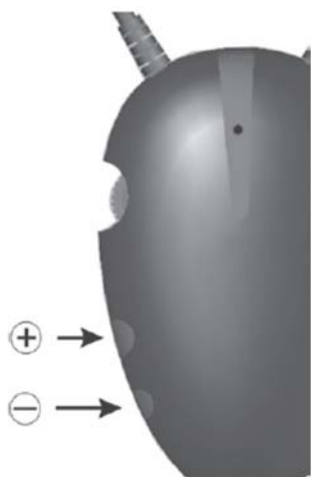

Pro úpravu hlasitosti stiskněte klávesy 6 (+ zesilujete, - zeslabujete). Pokud je hlasitost nejvyšší anebo nejnižší, pak uslyšíte krátké pípnutí.

Nastavení citlivosti smyčky

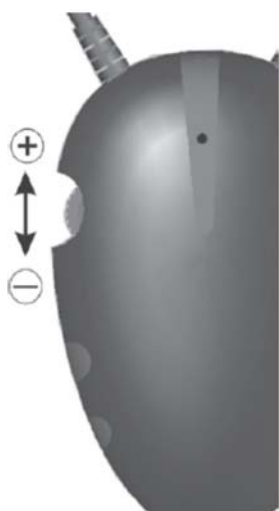

Smyčka má vestavěnou regulaci citlivosti smyčky (5). Zvolte si citlivost, která Vám vyhovuje pouhým otočením regulátoru. Na zadní straně smyčky najdete směry otáčení + zesilování, - zeslabování.

Úprava citlivosti je platná pouze pro smyčku. Nemá vliv na přídavná sluchátka.



Před použitím smyčky se vždy ujistěte, že je hlasitost nastavena na komfortní úrovni. Předejdete tím případnému zranění z důvodu vysoké hlasitosti. Doporučujeme vždy snížit hlasitost na nízkou úroveň.

Připojení k počítači


1. Zapněte počítač a ujistěte se, že je Bluetooth zařízení aktivní. Zapněte smyčku.
2. Stiskněte funkční klávesu (4) po dobu asi 6 sekund – do té doby, než začne střídavě blikat červená a modrá dioda. Tato příprava na párování vydrží u smyčky 2 minuty.
3. Spustíte Bluetooth software na Vašem počítači. Následujte instrukce k připojení CM-BT2.

4. Vyberte smyčku CM-BT2 ze seznamu nalezených zařízení. Pokud je to nutné, tak vložte heslo: 0000 a začne proces párování.
5. Pokud vše proběhne správně, tak začne dioda blikat modře. Ve sluchátkách nebo smyčce uslyšíte krátké pípnutí.

Softwary se mohou lišit. Výše uvedený postup je pouze orientační. V případě problémů kontaktujte dodavatele počítače (bluetooth zařízení).

Smyčka

Z důvodu bezpečnosti je smyčka rozpojitelná. Přesvědčte se, že je smyčka zapojena správně (viz obrázek níže).

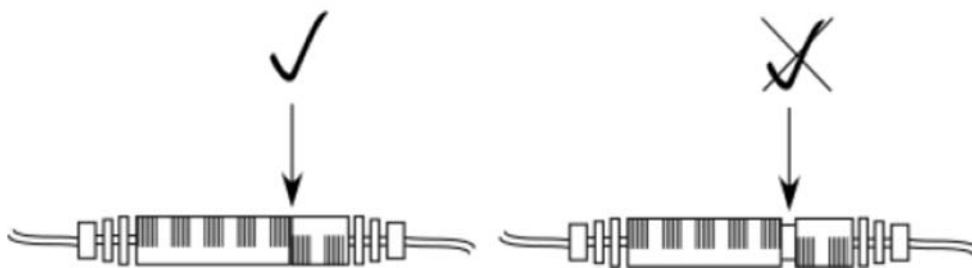

Bezpečnostní pokyny

Smyčka je vyrobena s použitím nejnovějších technologií a je v souladu s uznávanými bezpečnostními normami.

Prosím, všimněte si následujících bezpečnostních pokynů:

- Nikdy nevystavujte přístroj zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření nebo velké vlhkosti.
- Chraňte přístroj proti kontaktu s vodou, prašnému prostředí, páře, kapalinám, kyselinám, alkoholovým čisticím prostředkům atd.
- Používejte pouze dodané příslušenství. Vaše sluchátka mohou být použita pouze s konektorem jack 3.5 mm.
- Přístroj obsahuje malé části, které mohou být spolknuty. Chraňte před dětmi.

Výrobce nemůže nést zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění jakéhokoli druhu způsobené nevhodným použitím nebo zneužitím přístroje.

Péče o výrobek

Tento výrobek je bezúdržbové zařízení. Jestliže se zašpiní, pak jednoduše použijte měkký vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Nevystavujte produkt po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Kromě toho musí být také ochráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.

Upozornění: Všimněte si, že tento přístroj není ochráněn proti postříkání vodou. Neumisťujte ho proto do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny.

Z důvodu použitých baterií neumisťujte produkt do blízkosti otevřeného ohně, např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů.

Nakládání s odpady



Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic EU odevzdány do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na obalu produktu ukazuje, že nemá být vyhozen do normálního smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do příslušného sběrného dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní prostředí a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

Nabíjecí baterie



Nabíjecí baterie mohou být recyklovatelné. Prosíme o vrácení na příslušná místa (sběrné dvory) nebo k výrobcí (prodejci). Vracejte pouze plně vybité baterie. Chráníte tím životní prostředí.

Technická data

Model:	CM-BT2
Bluetooth verze:	Bluetooth verze 5.0
Frekvenční pásmo:	2.4 GHz ISM Spectrum Frequency hopping 79 channels
Modulace:	GFSK
BT profil:	HSP výstup HFP bezdrátová telefonie A2DP audio (stereo) AVRCP audio/video dálkové ovládání
Dosah:	do 10 metrů
Pohotovostní režim:	do 120 hodin
Doba hovoru:	do 3 hodin se smyčkou do 13 hodin se sluchátky (nejsou součástí balení)
Doba nabíjení:	3 hodiny
Hmotnost:	49 gramů
Rozměry:	48 x 76 mm



This telephone satisfies the following EU directives:

- 2011/65/EU RoHS directive
- 2012/19/EU WEEE directive
- 2014/53/EU RED directive

Compliance with the directives listed above is confirmed by the CE seal on the item.

CE compliance declarations are available on the Internet at www.humantechnik.com.

Technical specifications subject to change without notice.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě poruchy zařízení kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven nebo vyměněn a zaslán zpět. Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci s přístrojem, opravu neautorizovaným servisem Humantechnik (neodtrhávejte proto garanční samolepku z přístroje) a na mechanické poškození. Záruka bude uznána pouze po předložení originálu záručního listu, případně originálu prodejního dokladu.

Datum prodeje:



Razítko, podpis prodejce

Další produkty Humantechnik

Telefony pro nedoslýchavé, vibrační a zábleskové budíky, indukční smyčky, vibrační polštářky, TV a audio systémy, FM systémy, signalizační systémy atd.



Více informací na:
www.widex.cz
shop.widex.cz