

# PÉČE O ZÁVĚSNÁ SLUCHADLA

(BTE, s klasickým hákem)

## OTÍREJTE HADŘÍKEM

Sluchadlo každý den otřete přiloženým hadříkem, zbavíte ho nečistot, mastnoty a potu.

## OMÝVEJTE TVAROVKU

Alespoň 1x za měsíc je dobré ušní tvarovku sejmout z háku sluchadla, omýt a nechat odmočit. Před opětovným nasazením je nutné ji nechat dokonale vysušit (ev. profouknout balonkem).

## VYMĚŇUJTE HADIČKU

Hadička, která spojuje sluchadlo a tvarovku za několik měsíců ztvrdne a je potřeba ji nechat u foniatra nebo v servisu vyměnit. Tvrdá hadička může způsobovat pískání nebo změnu zvuku.

## ČISTĚTE VENT

Odvětrací kanálek (vent) ve tvarovce se může ucpat ušním mazem, proto jej dle potřeby vyčistíte prostrčením přiloženého nástroje. Některé tvarovky vent nemají.

## VYSUŠUJTE

Pro prodloužení životnosti sluchadla jej doporučujeme denně vysušovat pomocí elektronického vysušovacího pouzdra, ev. odvlhčovacích tablet.




## BATERIE

Ochranný štítek sejměte až před použitím baterie a před vložením do sluchadla ji nechte cca 1 minutu aktivovat.



## OSOBNÍ HYGIENA

Pravidelně si čistěte uši, boltce a ušní okolí, sahejte na sluchadlo čistýma rukama, občas si nechejte vyčistit zvukovod u svého ORL lékaře či foniatra.

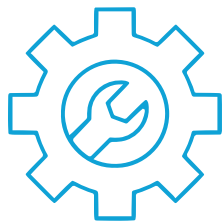

## SERVIS

Po dobu 2 leté záruční doby doporučujeme využít zvýhodněné preventivní prohlídky v našem servisu - technik vám sdělí, zda je potřeba se o sluchadlo lépe starat. I poté doporučujeme pravidelnou kontrolu/čištění v servisu.

## KDYŽ SLUCHADLO NEFUNGUJE

1. Vložte novou baterii
2. Vyčistěte odvětrací kanálek (vent)
3. Zašlete jej do servisu Widex

## CO SE SLUCHADLEM NEDĚLAT

- Nesprchovat se
- Nepoužívat lak na vlasy
- Nenechávat ho na dosah domácích mazlíčků
- Vyhnout se statické elektřině